

Die richtigen Ohrstöpsel auswählen

Alter	Ohrstöpsel zum Einsatz am Gehörgangseingang	Ohrstöpsel zum Einsatz im Gehörgang			Ohrstöpsel für Echo-Screen	Ohrstöpsel für AccuScreen
0,5 Jahre		 Pädiatrie Ohrstöpsel grün			 4.0 mm ANA	 3.7 mm AOT
		 3-5 mm geflanscht	 3-6 mm grün	 6 mm grün	 4.5 mm ANA	 4.0 mm AOT
	 7,5 mm, Schirmform	 4-7 mm geflanscht	 6 mm gelb		 5.0 mm ANA	 4.5 mm AOT
	 9 mm, Schirmform	 5-8 mm geflanscht			 Säugling ANA	 5.0 mm AOT
					 Pilz ANA	 4-7 mm AOT
10 Jahre	 10 mm, Schirmform	 7 mm Pilzform	 7 mm rot	 7 mm gelb		
	 11 mm, Schirmform	 8 mm Pilzform	 8 mm blau	 8 mm rot		
	 13 mm, Schirmform	 9 mm Pilzform	 9 mm grün	 9 mm blau		
		 10 mm Pilzform	 10 mm gelb	 10 mm grün		
	 15 mm, Schirmform	 11 mm Pilzform	 11 mm rot	 11 mm gelb		
Erwachsene		 12 mm Pilzform	 12 mm blau	 12 mm rot		
	 19 mm, Schirmform	 13 mm Pilzform	 13 mm grün	 13 mm blau		
		 14 mm Pilzform	 14 mm gelb	 14 mm grün		
		 15 mm Pilzform	 16 mm rot	 16 mm gelb		
	 22 mm, Schirmform	 19 mm Pilzform	 18,5 mm blau			

Die richtige Wahl des Ohrstöpsels bedarf Übung.

Für die meisten Tests werden generell geflanschte oder pilzförmige Ohrstöpsel verwendet (Impedanz, DPOAE, TEOAE, und automatisiertes ABR).

Für kurze Impedanz Screenings, werden manchmal schirmförmige Ohrstöpsel verwendet.

Die Tabelle soll als Hilfestellung zur Auswahl der passenden Ohrstöpsel dienen.